


PATIENTENINFORMATION DIGITALE GONARTHROSE- THERAPIE

Angeleitete und kontrollierte Sport- und Bewegungstherapie



Bedien-
oberfläche
für Therapie-
übungen

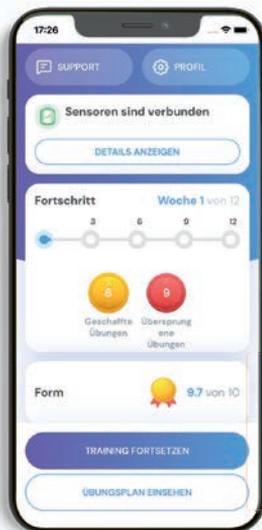

re.flex
recovery made simple

Ihr digitaler Trainingsassistent
powered by SPORLASIC

SO EINFACH STARTEN SIE DAS THERAPIEPROGRAMM



1. Sie haben **re.flex** recovery made simple auf Rezept oder einen Diagnosenachweis vom Arzt erhalten.



2. Installieren Sie die **re.flex** recovery made simple App durch Scannen des QR-Codes unten. **Die App ist ausschließlich für iPhone oder iPad verfügbar.**



Scannen und App
downloaden



3. Bestellen Sie Ihr Sensorkit direkt über SPORLASTIC. **Die Sensor-kitbestellung ist erst möglich, wenn Sie in der App registriert sind.**



4. SPORLASTIC sendet Ihnen das Sensorkit zu.



5. Reichen Sie Ihr Rezept bei Ihrer Krankenkasse ein und fordern Sie einen Freischaltcode an.



6. Ihre Krankenkasse sendet Ihnen den Freischaltcode zu.



7. Geben Sie Ihren Freischaltcode in der App ein, legen Sie die Sensorik an und beginnen Sie mit dem Training. Viel Erfolg :)



8. **Ihr 90-Tage Training geht zu Ende?** Schicken Sie die Sensoren kostenfrei mit dem Rücksendeschein an SPORLASTIC zurück.

Tip: Sie können sich von Ihrem Arzt ein Folgerezept besorgen und neue Sensoren zuschicken lassen.

Haben Sie Fragen? Benötigen Sie mehr Infos?

Wir sind Montag bis Donnerstag
8 – 17 Uhr und Freitag 8 – 16 Uhr
für Sie da, persönlich und digital.

Telefon: +49 7022 705181

Telefax: +49 7022 705113

E-Mail: digital@sporlastic.de

www.sporlastic.de/reflex